

# clearblue

## TESTE DE GRAVIDEZ

### compact

**FOLHETO DE INSTRUÇÕES** Leia este folheto com atenção antes de realizar o teste.

### COMO O TESTE FUNCIONA

Quando você está grávida seu corpo produz o hormônio da gravidez, o hormônio hCG (Gonadotropina Coriônica humana). A quantidade de hCG em seu corpo aumenta nos primeiros estágios da gravidez. **Clearblue compact** consegue detectar pequenas quantidades desse hormônio já no primeiro dia de sua menstruação. **Clearblue compact** pode ser usado a qualquer hora do dia para fornecer um resultado confiável. O **Clearblue compact** tem uma precisão de mais de 99%.



### REALIZANDO O TESTE

- Quando estiver pronta para iniciar o teste, abra o invólucro e remova a Tira-Teste.
- Com a ponta posicionada para baixo, mantenha o Marcador Absorvente imerso na urina por **apenas 3 a 7 segundos**.
- Depois de 3 a 7 segundos, remova o Marcador Absorvente da urina. Retire a tampa do cabo e posicione-o sobre a ponta de amostragem da Tira-Teste.

Se preferir, você pode coletar uma amostra de sua urina em um recipiente limpo e seco e mergulhar o Marcador Absorvente na urina por **apenas 15 segundos**. Você deve testar sua urina imediatamente.


### LENDO O TESTE

- O resultado pode ser lido em 3 a 10 minutos. Se aparecem **duas linhas azuis** na Janela de Teste, você está **'Grávida'** (uma linha pode ser mais clara que a outra).
- Se aparecer apenas **uma linha azul** na Janela de Teste, o resultado é **'Não Grávida'**.

Alguns medicamentos ou condições médicas podem causar resultados falsos. Para obter maiores informações, consulte a seção Perguntas e Respostas deste folheto das Instruções de Uso.

A tira-teste deve ser descartada após 10 minutos.

Se não houver nenhuma linha azul na Janela de Teste, o teste não funcionou corretamente. Isso pode ter ocorrido devido ao excesso ou à escassez de urina usada. Você deve realizar o teste novamente utilizando um novo teste, coletando uma amostra de sua urina, conforme descrito acima em 'Realizando o Teste'. Caso esteja insegura com seu resultado ou se seu resultado for 'Não Grávida' e você ainda suspeitar de gravidez, aguarde pelo menos 3 dias antes de realizar o teste novamente com um novo teste. Se você tiver alguma dúvida, procure seu médico.

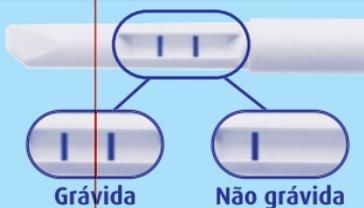

### PERGUNTAS E RESPOSTAS

#### 1) Quando eu posso testar Clearblue Teste de Gravidez compact?

Você pode usar **Clearblue Teste de Gravidez compact** a qualquer hora do dia, a partir do dia esperado para o início da menstruação. Para saber se a menstruação está atrasada, calcule a duração normal do seu ciclo contando o número de dias desde o início da menstruação até o dia anterior ao início da próxima menstruação.

- Se tiver ciclos irregulares, você deve esperar um ciclo mais longo nos últimos meses antes de realizar o teste.
- Se não tiver ideia de quando a menstruação deveria ocorrer, recomendamos um teste 19 dias após a última vez em que fez sexo sem proteção.
- Se o resultado por "Não Grávida", e ainda houver suspeita de gravidez, você deve aguardar pelo menos 3 dias antes de realizar o teste novamente, pois você pode ter testado muito antecipadamente. **Consulte a pergunta 4.**

#### 2) Medicamentos ou condições médicas podem afetar o resultado?

- Leia sempre as instruções do fabricante do medicamento que você está tomando **antes** de realizar o teste.
- Remédios para fertilidade que contêm hCG podem fornecer resultados falsos (em geral, esses remédios são administrados por injeção, e testes realizados logo após sua administração podem dar um resultado "Grávida" falso).
- Outras terapias de fertilidade (como o citrato de clomifeno), analgésicos e contraceptivos hormonais (como a pílula anticoncepcional) não devem afetar o resultado.
- Se você interrompeu o uso de um método contraceptivo hormonal recentemente ou está utilizando terapias de fertilidade como o citrato de clomifeno, suas menstruações poderão ficar irregulares, levando você a realizar testes muito cedo.
- Se você esteve grávida recentemente (mesmo que não tenha levado a gravidez até o final), poderá obter um resultado "Grávida" falso.
- Gravidez ectópica, cistos ovarianos, menopausa e algumas condições médicas muito raras podem gerar resultados falsos. Caso obtenha resultados inesperados, converse com seu médico.

#### 3) O que devo fazer se obtiver o resultado 'Grávida'?

- Se o seu resultado for 'Grávida', marque uma consulta com seu médico o mais rápido possível.

#### 4) O que devo fazer se obtiver o resultado 'Não Grávida'?

- Se a sua menstruação estiver atrasada e o resultado for 'Não Grávida', realize o teste novamente dentro de 3 dias. Caso obtenha um outro resultado 'Não Grávida' e ainda não tenha menstruado, consulte seu médico.

Conservar em temperatura ambiente, entre 2 e 30°C. Mantenha-o longe do alcance de crianças.

Use-o uma vez. Descarte-o no lixo doméstico normal.

Não utilize se o invólucro estiver danificado. Não utilize a Tira-Teste que estiver com o prazo vencido.

Utilize o dispositivo em casa. Somente para uso

diagnóstico "In Vitro". [VD]



Fabricante: Unipath Limited, Bedford, MK44 3UP, Reino Unido. Importado e distribuído por Novartis Biocências S.A. Av. Ibirama, 518 - Complexos 441/3 - Taboão da Serra - SP CNPJ 56.994.502/0098-62 - Indústria Brasileira. Farm. Resp.: Marco A. J. Siqueira CRF-SP 23.873 Reg. ANVISA 80153480053. **Clearblue** é uma marca comercial. ©Unipath Limited 2007

Qualidade testada por Unipath Limited. Auto-teste para orientação de gravidez sem fins diagnósticos.

**Composição:** cada teste contém anticorpo monoclonal anti-beta hCG (0,72 µg), anticorpo monoclonal anti-alfa TSH (0,07 µg), IgG de cabra anti-coelho (0,72 µg), IgG de coelho (0,02 µg) e partículas de látex (11,4 µg). **Bibliografia:** -Chard T. Pregnancy Tests: A Review. Human reproduction 7, 701-710, 1992. - Lenton EA, Meal LM, Sulaiman R. Plasma concentrations of human chorionic gonadotrophin from the time of implantation until the second week of pregnancy. Fert. Steril. 37 773-8, 1993.