

NASALEZE*

Uso intranasal

Sem corante

Sem odor

Composição: 500 mg de celulose natural inerte.

NASALEZE é um produto com eficácia clinicamente comprovada que age na mucosa nasal, formando uma barreira contra alérgenos transportados pelo ar.

Indicação

NASALEZE é indicado na prevenção de rinite alérgica e alergias a ácaros da poeira domiciliar, pólen e pêlos de animais, evitando o aparecimento de sintomas como coceira e congestão nasal, coceira nos olhos, coceira e inchaço nas pálpebras, dificuldade para respirar, tosse seca e dor de cabeça decorrente da congestão nasal.

NASALEZE pode ser usado por adultos, grávidas, lactantes e crianças sob supervisão. Mantenha fora do alcance de crianças pequenas.

NASALEZE não é um medicamento.

Mecanismo de ação

Estudos mostraram que, com o aumento natural do muco nasal, é possível filtrar os alérgenos transportados pelo ar de maneira que somente o ar limpo chegue aos pulmões.

NASALEZE é composto pela celulose natural inerte que age formando uma camada de gel incolor que simula o muco nasal e atua como um filtro para poeira e microorganismos criando uma barreira entre as substâncias alérgicas e a mucosa nasal.

Com isso, o sistema imunológico não libera a histamina e outras substâncias responsáveis pelos sintomas da reação alérgica, evitando-se os sintomas da rinite, principalmente a coriza e o prurido nasal.

Dados de eficácia e segurança

A celulose natural inerte é uma substância geralmente considerada segura que combate a causa das reações alérgicas respiratórias, ao invés dos sintomas, porque age como um revestimento da mucosa, prevenindo que os alérgenos como o pólen e a poeira doméstica atinjam a mucosa e os pulmões.

O pó de celulose se torna um gel em contato com a umidade presente na mucosa nasal. Este gel tem características semelhantes ao muco natural.

Os estudos disponíveis indicam que o NASALEZE começa a agir rapidamente e apresentou uma melhora dos sintomas em cerca de 77% dos pacientes estudados. (Josling et al. Adv Ther, 20(4), 2003).

Em 2004, foi realizado estudo duplo-cego, controlado com placebo, em 94 pacientes com rinite alérgica intermitente e concluiu-se que os pacientes que fizeram uso do NASALEZE necessitaram de significativamente menos medicações de resgate do que os que utilizaram placebo (Emberlin et al. Curr Med Res Opin 2006; 22 (2)).

Estudo com crianças portadoras de rinite alérgica demonstrou que houve melhora significativa no *clearance* do muco nasal, sem interferir no movimento ciliar, além de aumentar, também significativamente, o pico de fluxo inspiratório nasal (Aivazis et al. Pediatr Chronica 2005, 5 (2)).

Não há relatos de eventos adversos com o uso da celulose natural inerte nos estudos publicados.

Precauções

Mantenha fora do alcance das crianças.

Evite o contato do produto com os olhos. Caso isso ocorra, lave-os com água corrente.

Advertências

Não utilize se a embalagem estiver violada.

Depois de rompido o lacre, utilize por até 6 meses.

Não utilize NASALEZE em conjunto com outros medicamentos nasais, pois pode ocorrer redução da eficácia de NASALEZE caso esses medicamentos “lavem” a mucosa nasal, eliminando a barreira protetora formada por NASALEZE.

Cuidados de conservação

Mantenha o frasco fechado. Conserve em temperatura ambiente, protegido da umidade.

Posologia e modo de usar:

Use quantas vezes forem necessárias.

Para se obter melhor resultado, utilize NASALEZE várias vezes por dia para que se mantenha uma camada constante de gel recobrindo o trato nasal.

Use NASALEZE antes de entrar em ambientes que habitualmente causam reações alérgicas, como lugares fechados, aviões, bibliotecas, jardins, ou antes de fazer limpezas.

Instruções de uso

Sempre agite o frasco antes de cada aplicação.

1. Antes de usar o produto, faça um teste apertando o frasco e verificando a força necessária para se obter uma nuvem de pó de aproximadamente 5 cm.



2. Assoe o nariz.

3. Posicione o frasco, na posição vertical, em uma das narinas e tampe a outra com o dedo.



4. Aperte o frasco com a mesma força utilizada no teste.

5. Aguarde dois segundos e inspire normalmente para que o produto alcance o trato nasal.

6. Repita os passos 3 a 5 na outra narina.

Lembre-se de reaplicar o NASALEZE cada vez que assoar o nariz.

Efeitos adversos

NASALEZE não é absorvido pelo organismo e é facilmente eliminado junto com o muco nasal.

NASALEZE não possui efeito adverso conhecido, não causa sonolência, é inodoro e sem sabor.

Toxicidade

Não há registros de toxicidade com celulose natural inerte.

MS 10009300010

Farm. Resp.: Nami Lavigne Nakano - CRF-RJ 8.666

Importado por:

MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

Estrada dos Bandeirantes, 3091 - Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 33.060.740/0001-72 - Indústria Brasileira

*Marca de Fábrica

Fabricado por:

Nasaleze Limited

Unit 6 The Ship Yard

Ramsey, Isle of Man IM8 3DT

Central de atendimento 08000 117788