

OPTI-FREE® SUPRACLENS®

LIMPADOR ATIVO

DESCRIÇÃO: **OPTI-FREE SUPRACLENS Limpador Ativo** é uma solução sem conservantes, estéril, que contém pancreatina como ingrediente ativo limpador, borato de sódio, propilenoglicol e água purificada.

AÇÃO: As lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas) formam durante o uso uma película composta de proteínas e de outras substâncias que se encontram nas lágrimas. **OPTI-FREE SUPRACLENS Limpador Ativo** ajuda a romper e remover esta película das lentes de contato.

INDICAÇÕES: **OPTI-FREE SUPRACLENS Limpador Ativo** é indicado especialmente para limpar todas as lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas) simultaneamente cada vez que são limpas com **OPTI-FREE EXPRESS Solução Desinfetante Multi-Propósito** ou **OPTI-FREE Solução Multi-Ação**.

CONTRA INDICAÇÕES: Pessoas alérgicas à carne de porco ou a qualquer dos componentes do **OPTI-FREE SUPRACLENS Limpador Ativo** não devem utilizar o produto.

INSTRUÇÕES GERAIS:

- Lavar e enxaguar as mãos antes de manusear as lentes.
- Retirar primeiro sempre a mesma lente, direita ou esquerda, para evitar misturá-las.
- Quando for utilizar um estojo novo, enxaguá-lo antes com **OPTI-FREE EXPRESS Solução Desinfetante Multi-Propósito** ou **OPTI-FREE Solução Multi-Ação** para evitar qualquer resíduo.
- Para obter maior conforto com as lentes, usar o **OPTI-FREE SUPRACLENS Limpador Ativo** toda vez que retirá-las.
- Depois de colocar as lentes novamente, descartar a solução utilizada e enxaguar o estojo com **OPTI-FREE EXPRESS Solução Desinfetante Multi-Propósito** ou **OPTI-FREE Solução Multi-Ação** e deixá-lo secar ao ar. Recomenda-se trocar o estojo freqüentemente por um novo.

INSTRUÇÕES PARA O CUIDADO COM SUAS LENTES:

- Preencher os dois lados do estojo com **OPTI-FREE EXPRESS Solução Desinfetante Multi-Propósito** ou **OPTI-FREE Solução Multi-Ação**.
- Retirar as lentes e limpar com **OPTI-FREE EXPRESS Solução Desinfetante Multi-Propósito** ou **OPTI-FREE Solução Multi-Ação**. Enxaguar e colocar cada lente no compartimento apropriado.
- **Agitar bem o frasco de OPTI-FREE SUPRACLENS Limpador Ativo antes de usar.**
- Colocar uma gota de **OPTI-FREE SUPRACLENS Limpador Ativo** em cada lado do estojo para limpar as lentes enquanto são conservadas em **OPTI-FREE EXPRESS Solução Desinfetante Multi-Propósito** ou **OPTI-FREE Solução Multi-Ação**.
- Fechar o estojo e agitar levemente para misturar as soluções.

- Deixar as lentes no estojo durante 6 horas no mínimo com **OPTI-FREE EXPRESS Solução Desinfetante Multi-Propósito**.
- Quando for utilizar as lentes, retirá-las do estojo que contém a solução de limpeza e desinfecção.
- Enxaguar bem as lentes com **OPTI-FREE EXPRESS Solução Desinfetante Multi-Propósito**. As lentes estão prontas para serem utilizadas.
- Sempre descartar a solução utilizada no estojo, enxaguar com **OPTI-FREE EXPRESS Solução Desinfetante Multi-Propósito** e deixá-lo secar ao ar.

PRECAUÇÕES:

Usar somente solução nova, não reutilizar. A solução do estojo deve ser utilizada somente uma vez. Para evitar contaminação, não tocar o conta-gotas do frasco em qualquer superfície. Ao retirar as lentes do estojo, deve-se enxaguar antes de colocá-las nos olhos. Se não forem enxaguadas, podem causar desconforto. Tampar o frasco depois de utilizá-lo. **Manter o produto rigorosamente abaixo de 30°C**. A conservação inadequada causará perda da eficácia. Manter o frasco bem fechado enquanto não estiver em uso. Usar antes da data de validade que está impressa no frasco e no cartucho. Descartar a solução depois de 6 meses aberta. **Manter fora do alcance das crianças.**

ADVERTÊNCIAS:

- **OPTI-FREE SUPRACLENS Limpador Ativo** não deve ser utilizado diretamente nas lentes ou nos olhos.
- É extremamente importante seguir as instruções de seu oftalmologista e todas as instruções que constam neste produto para usar e conservar corretamente as lentes de contato e os produtos que se usam para seu cuidado, inclusive o estojo. Se você sentir desconforto persistente nos olhos, lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão, retirar **IMEDIATAMENTE** as lentes e consultar o seu oftalmologista, porque o problema pode tornar-se sério.

APRESENTAÇÃO:

OPTI-FREE SUPRACLENS Limpador Ativo é apresentado em frascos de 5 ml contendo 3 ml de solução.

Processo de esterilização usado na fabricação: Filtração.

Lote, fabricação e validade: Vide cartucho.

Farm. Resp.: Lygia C. Piazza CRF-SP N° 8066

Reg. ANVISA nº 10002390068

ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

Av. Nossa Senhora da Assunção, 736 05359-001 São Paulo SP

CNPJ 60.412.327/0013-36

Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 7077908

Alcon

ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

