

Favor ler cuidadosamente a bula e guardá-la para uso futuro caso seja necessário.

UNIQUE-PH

Solução Multi-Propósito
para lentes de contato rígidas gás-permeáveis

UNIQUE-PH Solução Multi-Propósito limpa, conserva, desinfeta e aumenta a capacidade de umectação/lubrificação inicial das lentes promovendo o uso confortável de lentes de contato rígidas acrílicas e gás permeáveis. UNIQUE-PH Solução Multi-Propósito é uma formulação suave, eficaz, livre de clorexidina, tiomersal e cloreto de benzalcônio, para os usuários de lentes de contato rígidas acrílicas e gás permeáveis. UNIQUE-PH deve ser usado conforme as recomendações do oftalmologista.

DESCRIÇÃO:

UNIQUE-PH Solução Multi-Propósito é uma solução aquosa, estéril, tamponada para tornar o pH e a tonicidade do produto similares ao pH e à tonicidade da lágrima. UNIQUE-PH contém um sistema polimérico umectante desinfetante único, polietilenoglicol, poloxamina, ácido bórico, propilenoglicol e os conservantes POLYQUAD® (poliquaternium-1) 0,0011% e edetato dissódico 0,01%.

AÇÕES:

UNIQUE-PH Solução Multi-Propósito remove proteínas e lipídios da superfície das lentes e ajuda evitar depósitos de difícil remoção das lentes.

UNIQUE-PH Solução Multi-Propósito foi também desenvolvido para o enxágue das lentes, eliminando depósitos que se soltaram das lentes. Um sistema polimérico único facilita a colocação das lentes e proporciona uma umectação intensa e uniforme. Esta formulação foi desenvolvida para proporcionar um efeito suavizante aos olhos durante o uso de suas lentes de contato. UNIQUE-PH contém um sistema conservante de eficácia comprovada na destruição de microrganismos. UNIQUE-PH Solução Multi-Propósito é eficaz para limpeza, desinfecção e conservação e ainda é compatível com os tecidos oculares podendo ser utilizado na colocação das lentes. UNIQUE-PH dispensa o uso de limpadores diários.

INDICAÇÕES (USOS):

UNIQUE-PH Solução Multi-Propósito é indicado para a limpeza, desinfecção, conservação e enxágue de lentes de contato rígidas acrílicas e gás permeáveis

UNIQUE-PH Solução Multi-Propósito pode ser usado como diluente para OPTI-FREE[®] SUPRACLENS[®] Limpador Ativo na limpeza enzimática.

CONTRA-INDICAÇÕES (Razões para não usar):

UNIQUE-PH Solução Multi-Propósito não deve ser usado em lentes de contato gelatinosas.

Não utilizar para desinfecção térmica.

Pessoas alérgicas a quaisquer dos componentes de UNIQUE-PH não devem utilizar este produto.

INSTRUÇÕES GERAIS:

- Sempre lavar e enxaguar as mãos antes de manusear suas lentes de contato.
- Manusear sempre uma lente de cada vez, direita ou esquerda, para evitar trocas.
- Ao utilizar um estojo para lentes novo enxaguá-lo com solução de UNIQUE-PH, ou conforme recomendado por seu oftalmologista. A Alcon recomenda trocar frequentemente o estojo.

INSTRUÇÕES PARA O CUIDADO ADEQUADO DAS LENTES:

- Retirar cada lente e friccionar cuidadosamente as duas faces da lente com 2 a 4 gotas de UNIQUE-PH Solução Multi-Propósito, certificando-se de ter limpado os dois lados da lente.
- Enxaguar completamente cada lente com UNIQUE-PH Solução Multi-Propósito conforme recomendado por seu oftalmologista.
- Encher o estojo para lentes com solução nova de UNIQUE-PH suficiente para cobrir as lentes. Colocar as lentes no estojo e verificar se ficaram completamente submersas. Fechar bem o estojo.
- Deixar as lentes no estojo fechado durante a noite ou por no mínimo 4 horas.
- As lentes podem ser retiradas do estojo e colocadas diretamente nos olhos. Para maior conforto, uma gota de UNIQUE-PH pode ser pingada em cada lente antes da sua colocação nos olhos.
- Após retirar as lentes do estojo esvaziar, enxaguar e deixar o estojo secar ao ar.

ADVERTÊNCIAS:

É fundamental seguir as instruções de seu oftalmologista e da bula para o uso correto das lentes de contato e das soluções para o cuidado dessas lentes. Em caso de desconforto ocular persistente, lacrimejamento excessivo, alterações da visão, vermelhidão do olho, retirar imediatamente as lentes e consultar seu oftalmologista, pois o problema pode tornar-se mais sério.

PRECAUÇÕES:

- Utilizar sempre uma solução nova de UNIQUE-PH. Nunca reutilizar a solução de seu estojo de lentes.
- As lentes devem ser limpas e desinfetadas todas as vezes que forem retiradas.
- Sempre enxaguar bem as lentes após efetuar a limpeza conforme recomendado pelo seu oftalmologista, para eliminar depósitos soltos da superfície.
- Não utilizar sabão, detergente ou qualquer outro produto de limpeza doméstica.
- Para evitar contaminação não toque o conta-gotas do frasco em qualquer superfície nem transfira a solução para outro recipiente.
- Manter o frasco bem fechado quando não estiver em uso.
- Recolocar a tampa após o uso.
- Conservar em temperatura ambiente.
- Utilizar a solução antes do prazo de validade marcado na embalagem.
- Descartar o frasco aberto por mais de seis meses.
- Manter fora do alcance das crianças.

APRESENTAÇÕES:

Frascos plásticos contendo 120 ml de solução.

Processos de esterilização usados na fabricação: Autoclavação e Filtração.

Lote, fabricação e validade: Vide cartucho.

MS-10002390122

Fabricado por:

ALCON LABORATORIES, INC.

Fort Worth, Texas, EUA

Importado por:

ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

Av. N. S. da Assunção, 736 05359-001 São Paulo SP

CNPJ 60.412.327/0013-36

Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Lygia C. Piazza CRF-SP N° 8066

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 155553

ALCON

Alcon Laboratórios do Brasil Ltda.